




Vial-Mate Concept

Antibiotika klart för blandning i ett helt slutet system

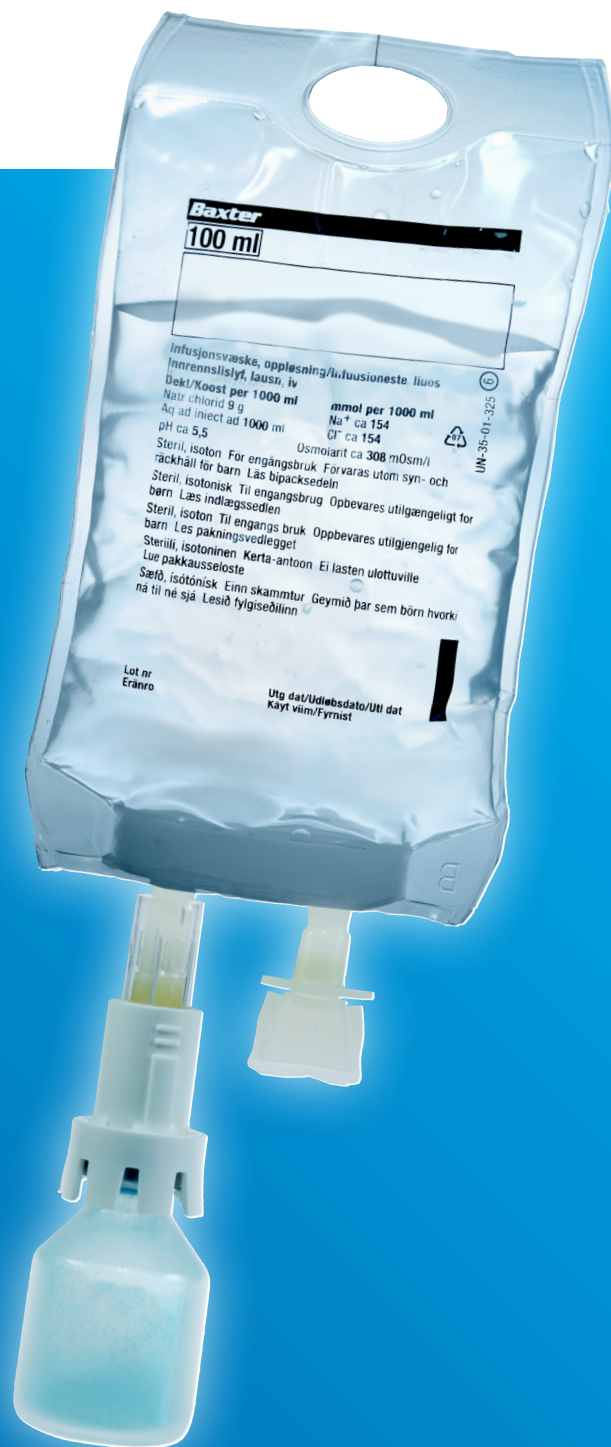

Antibiotikadoser förberedda för blandning i ett slutet och säkert system

En rationell läkemedelshantering

Vial-Mate Concept levereras till avdelningen färdigkopplat med önskat antibiotika. Med ett enkelt handgrepp aktiveras kopplingen så läkemedlet i ampullen kan blandas. Det går snabbt och kan göras patientnära eftersom Vial-Mate Concept är ett slutet system.²

En säkrare läkemedelshantering

Användning av färdigkopplade läkemedel som Vial-Mate Concept minskar risken för kontamination och förväxlingar¹. De är sammankopplade i steril produktion och varje set är spårbart och tydligt etiketterat. Det slutna systemet är också kanylskyddat så att inga stickskador ska inträffa. Efter användning kasseras det slutna systemet i sin helhet.

Anpassat till de antibiotika som används på sjukhuset

Valfritt antibiotika kan beställas som Vial-Mate Concept vilket möjliggör beställning i enlighet med upphandlat sortiment

Ett års hållbarhet

Vial-Mate Concept har ett års hållbarhet i rumstemperatur vilket underlättar hantering och lagerhållning.²

Enkelt och praktiskt

Den enkla hanteringen av de färdigkopplade läkemedlen underlättar arbetet. Den långa hållbarheten i rumstemperatur och möjligheten att beställa upphandlade antibiotika som Vial-Mate Concept skapar goda förutsättningar för att ha de färdigkopplade produkterna i sjukhusets bassortiment.

Det här är Vial-Mate Concept



INFUSIONSVÄTSKA

- Baxters Viaflo-påse utformad för låg residualvolym av infunderat läkemedel⁴
- Droppfria portar
- Brett sortiment av påsar 50, 100 och 250 ml³

VIAL-MATE ADAPTER

- Säkerställer slutet system för blandning
- Blandning aktiveras med ett enkelt handgrepp
- Kanylen ligger skyddad inuti adaptern
- Passar till injektionsflaskor med 20 mm hals


LÄKEMEDEL

- Valfritt antibiotika kan beställas som Vial-Mate Concept.
- Läkemedlet ligger orört kvar i injektionsflaskan tills Vial-Mate adaptern aktiveras och läkemedlet blandas
- Injektionsflaskan kan inte avlägsnas från adaptern. Underlättar identifikation och avfallshantering


Aktivering och blandning

Börja med att koppla ett infusionsaggregat till påsen. Fyll det med infusionsvätska innan aktivering och blandning av antibiotika påbörjas.


Aktivera

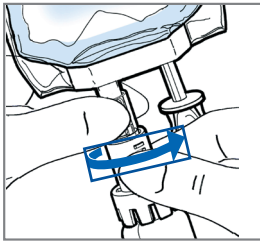


1. Håll kolven i ett fast grepp. Vrid sockeln i pilens riktning för att låsa upp.

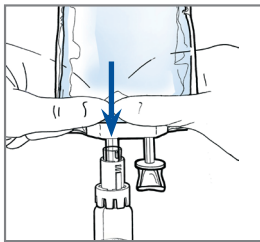

2. Stöd injektionsflaskan mot ett fast underlag. Ta tag i den hårda nedre delen på påsen och tryck ner kolven i sockeln tills det hörs ett "klick".

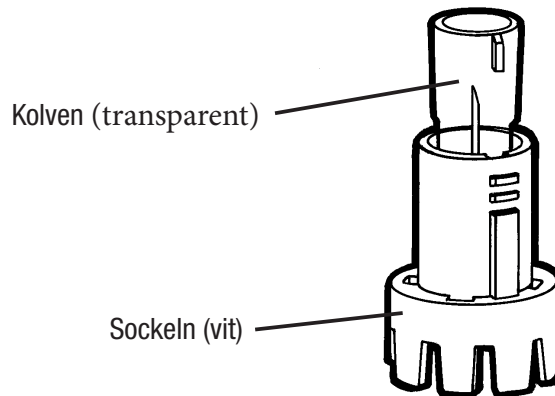


Blanda

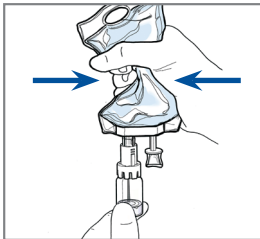

3. Kläm in lösningen i injektionsflaskan tills den är halvfylld.




4. Skaka för att lösa upp läkemedlet. Håll samtidigt i sockeln och påsen.

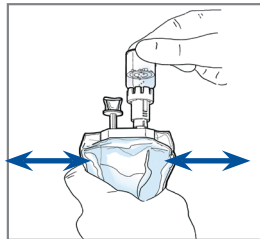


5. Håll påsen med injektionsflaskan uppåt. Kläm på påsen för att överföra det upplösta läkemedlet till påsen.

Avsluta

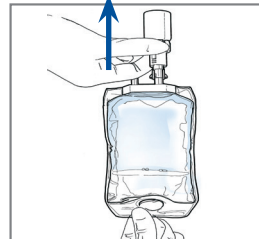

6. Avsluta genom att hålla i påsens hängare och adapterns sockel. Dra sedan ut kolven ur sockeln.

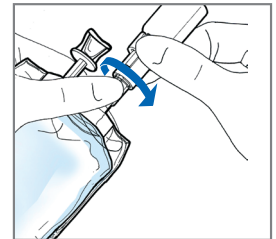

7. Håll i kolven och vrid sockeln i pilens riktning för att låsa systemet.

Injektionsflaskan avlägsnas aldrig från adaptorn. Infusionssetet kasseras i sin helhet efter användning.

REFERENSER:

1) Syddansk Sudhedsinnovation/Business case: Koblet antibiotika. Juni 2015, 2) Stability review Docked Vial-Mate (Baxter Data on file) 3) Produktresumé Natriumklorid Baxter Viaflo Infusionsvätska, lösning 9 mg/ml 4) Laroy et al Comparison of container system residual volumes and the implications for medical error Eur J Hosp Pharm 2012 19: 360-363

Baxter

Baxter Medical AB
Box 63, 164 94 Kista
T (08) 632 64 00 F (08) 752 01 12

www.baxter.se

Baxter, VialMate och Viaflo är varumärken som tillhör Baxter International Inc.
© Copyright 2005. Baxter Healthcare Corporation. Eftertryck förbjudes.